Инструкция по надеванию халата



Возьмите стерильный халат и войдите в помещение, где исключен риск заражения.



Вденьте обе кисти рук в проемы рукавов. Держите халат на некотором расстоянии от себя и дайте ему полностью расправиться.



Просуньте обе руки в рукава, держа руки на уровне плеч. При этом халат не должен прикасаться к телу и одежде.

Убедитесь, что край манжета находится у основания кисти.



Медсестра должна натянуть халат на плечи, прикасаясь только к внутренней поверхности халата.



Зафиксировать горловину с помощью липучки.



Завязать внутренние завязки халата.



Наденьте перчатки. Возьмите карточку двумя руками, отсоедините левый конец внешнего пояса от карточки, держите пояс в левой руке.



Отдайте карточку медсестре, сделайте ³/₄ оборота влево. При этом медсестра должна вытянуть внешнюю завязку на полную длину.



Извлеките внешнюю завязку, вытягивая ее из карточки, которую держит медсестра, и завяжите пояс на левом боку.