

Комплект белья хирургического для эндопротезирования тазобедренного сустава

Разворачиваем комплект и раскладываем его на большом инструментальном столе



- 1 Простыня на большой инструментальный стол
- 2 Простыня с разрезом, впитывающей зоной и липким краем
- 3 Бахила-чулок на манжете
- 4 Простыня с впитывающей зоной и липким краем для ног
- 5 Простыня с впитывающей зоной и липким краем на экран
- 6 Простыня ламинированная с липким краем - 2 шт.
- 7 Чехол для малого инструментального стола
- 8 Салфетки влагогигиенизирующие для осушения поверхностей - 4 шт.
- 9 Операционная фиксирующая лента - 3 шт.



1. Надеваем чехол №7 на малый инструментальный стол



2. Раскладываем и закрепляем на пациенте простыню №2 с разрезом



3. Надеваем бахилу-чулок №3 на оперируемую ногу и фиксируем ее липкими лентами №9



4. Раскладываем нижнюю простыню №4



5. Раскладываем и фиксируем верхнюю простыню №5 на экран



6. Фиксируем ламинированные простыни №6 вдоль операционного поля



7. Приклеиваем хирургическую пленку на операционное поле